

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :SH-TL-09 Yayın Tarihi :12.11.2019
	ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/4

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayılar	20.11.2022	Hasan COŞKUN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :SH-TL-09 Yayın Tarihi :12.11.2019
	ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/4

1.AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı ultrasonik yıkama cihazını tam ve eksiksiz kullanmayı tarif etmektir. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanlarını kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Steril : Mikropsuz
MSÜ : Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

3. REFERANS DOKÜMANLAR



Merkezi Sterilizasyon İşleyiş Prosedürü
Kirlilik Kontrol Test Formu

4. UYGULAMA

Ultrasonik cihazın solüsyonu günlük olarak hazırlanır. Cihaz 28 litre kapasitelidir. Cihazın içerisine hazırlanan solüsyona enzimatik temizleyicisi kullanılır. Firma önerilerine göre 28 litrelik olan cihaz kapasitesi içerisine 500 cc enzimatik temizleyici ilave edilir. Solüsyon bu şekilde kullanıma hazır hale getirilmiş olur. Solüsyonun testi kirlilik kontrol testi ile yapılır. Kirlilik testi stripi haftanın ilk mesai gününde solüsyon hazırlandıktan sonra yapılır. Cihaz 45 derece ye ısıtılır ve 5 dk ultrasonik açılır. Kirlilik kontrol stripi bu aşamada solüsyon içerisine bırakılır. Strip üzerindeki renk değişimi kontrol edilir. Kirlilik kontrol stripleri çıkarıldıktan sonra strip üzerine yapılan tarih ve yapan personelin ismi yazılır. Strip sonuçları Kirlilik Kontrol Test Formu ile kayıt altına alınır.



Etkinlik Performans Testi

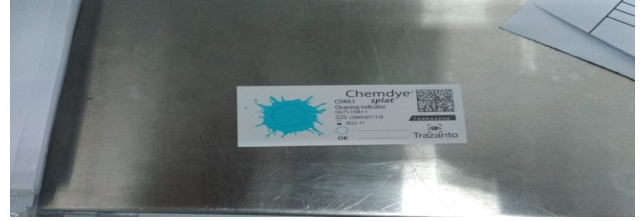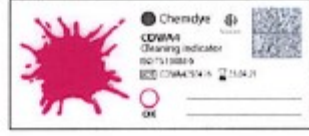

CDWAH Holder

DELİKLİ ALAN: Su basıncı, püskürtme basıncı, solüsyon kimyası ve konsantrasyonu, ısı.

KAPALI ALAN: solüsyon kimyası ve konsantrasyonu, su kalitesi, ısı, çevrim süresi, vb.



Sonuç referans kılavuzu (✓OK / X HATA)

GÖRSEL sonuç	DELİKLİ ALAN etki sonuçları				KAPALI ALAN etki sonuçları			
	Makine içi yerleşim	Su basıncı	M e k a n i k kuvvetlerin etkisiyle pompa, suyu koku, vs.)	Sıcaklık	Mazuziyet süresi	Solüsyon (Rp. ecc)	Su Kalitesi	
 İşlem görme değeri sonuç	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 İşlem görme değeri sonuç	✓	✓	✓	X	X	X	X	
 İşlem görme değeri sonuç	✓	✓	✓	XX	XX	XX	XX	
 İşlem görme değeri sonuç	✓	✓	✓	XXX	XXX	XXX	XXX	
 İşlem görme değeri sonuç	X	X	X	XXX	XXX	XXX	XXX	
 İşlem görme değeri sonuç	X	X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
 İşlem görme değeri sonuç	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
 İşlem görme değeri sonuç	—	—	—	—	—	—	—	

NOT: Bu sonuçlar değişkenlerden birinin veya kombinasyonun başarısızlığının bir sonucu olabilir. Başarısız alan değerleri seçtikten, düzeltilmiş önlemleri alın. Sonuç devam ederse yıkama makinesinin teknik servisine başvurun. X Değeri ne kadar yüksekse, o X değeri ne kadar başarısızlığı üzerindeki etkisi de o kadar yüksek olur.

Kirilik testi kontrolünde strip üzerinde mavi olan stripin tamamen temizlenmesi gerekir. Mavi renk değişimi pembe renge dönük olursa kirilik testinden geçilemez. Solüsyon tekrar hazırlanıp, süreçler baştan başlatılır.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :SH-TL-09 Yayın Tarihi :12.11.2019
	ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :4/4

Solüsyon hazırlandıktan sonra uygulamaya başlanır. Kirli olarak gelen malzemeler ilk önce üzerlerindeki kaba kirlerinden arındırmak üzere musluk altında suya tutulur. Daha sonra aletler ultrasonik yıkama makinasının içindeki sepete aletlerin eklemli olan kısımları açık olacak şekilde yerleştirilir. Eğer aletler sökülüp parçalanacak şekilde ise aletler küçük parçalara bölünür. Lümenli aletler yıkacak ise aletler lümenli olan kısımların açık olarak sıvı geçişi sağlanır. Aletleri yerleştirme işlemleri bittikten sonra cihaza 45 derecede 5 dk lık ultrasonik çalıştırma işlemi başlatılır. Cihaz yıkama işlemi başladıktan sonra cihazın kapağı kapatılır. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra cihazın yıkama haznesi içerisindeki sepetin iki tarafından tutulup aletler dışarıya alınır. Yıkamadan çıkan aletler musluk suyu altında dikkatli bir şekilde durulanır. Aletlere, Merkezi Sterilizasyon İşleyiş Prosedürü'ne uygun şekilde paketleme işlemi yapılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Hemşirelik Hizmetleri Direktörü/ Başhemşire sorumludur.