

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HB-TL-85 Yayın Tarihi :23.10.2019
	AMELİYAT MASASI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/3

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm sayfalar	30.10.2022	Hasan COŞKUN Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HB-TL-85 Yayın Tarihi :23.10.2019
	AMELİYAT MASASI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, ameliyat masalarının kullanımı, hangi fonksiyonları yapılabildiğini tanımlamaktır. Ameliyathane işleyiş sürecini kapsar,

TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

2. REFERANS DOKÜMANLAR

3. UYGULAMA

- Ameliyat masaları kullanım esnalarında hasta ve çalışan güvenliği açısından kilitli pozisyonlara getirilir. Kurumda kullanılan ameliyat masaları Acomed 6600, Bıçakçılar 2000R ve Üzümcü omf 5 olarak 3 farklı markadan oluşmaktadır. Her markaya göre masanın sabitlenmesi için kilitleme mekanizması vardır. Bıçakçılar ve üzümcü marka ameliyat masaları ayak yardımı ile basarak kilitleme sistemleri mevcuttur, Acomed marka ameliyat masası ise kumandadan kilitleme mekanizması mevcuttur.
- Ameliyat masa kumandalarının üzerinde yapılmak istenen işlemler resimli görsel ile belirtilmiştir. Ameliyat masalarının kumandaları güvenlik için tek tuşla çalışmaları devre dışı bırakılmış olup, çalıştırmak istediğiniz zaman kullanım tuşu (genellikle E harfi) ile basılarak kullanılır.
- Ameliyat masası kumandasından ameliyat masası aşağı -yukarı, sağa- sola dönme, total olarak baş yukarı- baş aşağıya, belden baş yukarı -belden baş aşağıya şeklinde opsiyonel olarak hareket fonksiyonları imkanı vermektedir.
- Acomed ve Bıçakçılar marka olan ameliyat masaları masa kilitli olduğu pozisyonda (altı sabit iken) hasta yatmış olduğu yatak kısmı ekstra 30 cm ileri – geri hareket fonksiyonuna sahip masalardır.
- Ameliyat masalarına ait ekipmanlarda mevcuttur. Hastaların kollarını yerleştirmek için kol tahtaları sağ ve sol olmak üzere iki tarafa da takılabilmektedir. Bunun yanında yan destekler, hasta çemberleri, omuz destekleri ve jinekolojik pozisyon verebilmek için bacaklıklar mevcuttur. Tüm ameliyat masaları jinekolojik masa şekline dönebilmektedir. Jinekolojik pozisyona döndükten sonra masanın alt kısımları sökülür.
- Bıçakçılar marka ameliyat masasına uygun olarak beyin cerrahisi kliniğine ait at nalı aparatı ve çivili başlık aparatları mevcuttur. Bu sistemler takıldıkları zaman ameliyat masalarının ön kısımları masadan sökülürler.
- Acomed marka ameliyat masasının ise ortopedi kliniğine ait traksiyon masa kiti mevcuttur. Bu sistemde takıldığı zaman masanın alt kısımları sökülür. Traksiyon masası kurulup hasta uygun pozisyonda yerleştirildikten sonra tüm mekanizmalar kilitlenir.

4.1. Ameliyat Masalarının Temizliği

Ameliyat masalarının ameliyatın bitiminden sonra nötr pozisyona getirilir. Nötr pozisyona getirilen ameliyat masasının temizliği yüzey dezenfektanları ve uygun bezler ile silinerek yapılır. Ameliyat

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HB-TL-85 Yayın Tarihi :23.10.2019
	AMELİYAT MASASI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :3/3

masasının aksesuarları da yüzey dezenfektanları ile yapılır. Ameliyat masaları temizlikleri yapılırken ameliyat masalarının altında kan ve sıvıların kalmasını önlemek amaçlı temizlik esnasında ameliyat masası kilitleri açılarak altındaki zemin temizlikleri de mutlaka yapılır.

4.2. Ameliyat Masasının Arızalanması Durumlarında Yapılacaklar

Ameliyat masasının arızalanması durumunda, hastane biyomedikal bölümüne HBYS iş takip sistemi üzerinden ya da telefonla bilgi verilir. Biyomedikal Görevlisi yaptığı incelemelerden sonra gerekli görürse ameliyat masasını biyomedikal atölyesine indirebilir. Biyomedikal Görevlisi tamir imkanı olmayan durumlarda, tedarikçi firma ile görüşerek, arızalı durumun ivedilikle çözüme kavuşturulması sağlanır. Arızalanan ameliyat masasının yerine manuel olarak çalışan yedek ameliyat masası geçici süreyle konumlandırılır.

4. SORUMLULAR

Ameliyathanede çalışan tüm mesleki grupları kapsamaktadır.