

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HB-TL-83 Yayın Tarihi :27.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/2
	RİTİM HOLTER CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	30.09.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
	.			
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HB-TL-83 Yayın Tarihi :27.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/2
	RİTİM HOLTER CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; ritim holter cihazının kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Hasta bakım sürecini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

EKG : Elektrokardiyografi

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Dezenfektan Kullanım Listesi

4. UYGULAMA:

Ritim holter EKG, kalbin elektrik aktivitesinin 24 saat veya daha uzun süreli olarak kaydedilmesi işleminin adıdır. Ritim Holter (veya EKG Holter) olarak da anılır. Kullanımı için;

- Hastaya üst kısmındaki kıyafetlerinin tamamın niçin çıkarılması gerektiği anlatılarak, çıkarması söylenir.
- Hastanın göğsüne altı adet elektrot uygun yerlere yapıştırılır.
- Kırmızı, sarı, beyaz, mavi, yeşil, turuncu sıra ile kabloları elektrotlara takılır.
- Uzun süre kalacağı için elektrotlar düşmesin diye bant ile sabitlenir.
- Yeşil açma düğmesinden cihaz açılır.
- Cihaz açıldıktan sonra mavi tuş ile tüm çıkan yazılar onaylanır.
- ECG reading 0:00 yazısını gördüğümüzde cihaz ölçüme hazırdır.
- Cihaz 24 saat hasta üzerinde kalır ve ölçümleri kayıt eder.

4.1. Cihazın bilgisayara aktarılması

- Cihazın pilleri çıkarılıp USG kablosuna bağlanır.
- Ritim holter programı açılır. Mavi bilgisayar işareti basılarak cihazın bilgisayara aktarılması sağlanır.
- Aktarım bittikten sonra ? butonuna basılıp analiz edilir.
- Hastanın adı-soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti doldurulup kayıt edilir.
- İşlemi biten cihaz Dezenfektan Kullanım Listesi'ne uygun ürün ile silinerek bir sonraki hasta için hazır bırakılır.

5. SORUMLULAR

Ritim Holter Cihazı kullanan tüm sağlık çalışanları sorumludur.