

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	28.09.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HB-TL-82 Yayın Tarihi : 27.09.2019
	LARİNGOSKOP KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; laringoskop cihazının kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Dezenfektan Kullanım Listesi

Günlük Tıbbi Cihaz Kontrol Formu

4. UYGULAMA:

Hastanede yatan ya da acil gelen hastayı entübe etmek için kullanılan cihazın zamanında ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için kullanıma hazır bulundurmak ve çalışabilirliğini sağlamak gerekir. Bunun için;

- Kullanım öncesi mutlaka ışığın yanıp yanmadığı kontrol edilir. Yanmıyor ise veya zayıf ise piller ya da ışık kaynağı lambası değiştirilir.
- Hendle kısmına entübe olacak hasta için uygun boyutta blade takılır.
- Laringoskop hazır halde iken sol elle handle tutulur.
- Hasta başı ekstansiyona getirilir.
- Laringoskop yardımı ile açılan traeka uygun boyutta olan endotrekeal tüp sağ el yardımı ile trakeaya yerleştirilir.
- Zor entübasyonlarda tüpün yerleşmesi için stile kullanılır.
- İşlem sonrası blade dezenfektan ile yıkanıp bir sonraki kullanım için hazır hale getirilir.
- Laringoskopun pillerinin bitme ihtimaline karşılık her serviste yedek pil bulundurulur.
- Günlük tıbbi cihaz kontrol formu ile laringoskopun günlük olarak kontrolü yapılır.

5.SORUMLULAR

Laringoskop bulunan tüm birimlerdeki sağlık çalışanları sorumludur.