

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-81 Yayın Tarihi : 27.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar.... Sayfa No :1/2
	TANSİYON HOLTER CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirme	Tüm sayfalar	01.10.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-81 Yayın Tarihi : 27.09.2019
	TANSİYON HOLTER CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; tansiyon holter cihazının kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Tansiyon holter cihazının kullanımını kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

EKG :Elektrokardiyografi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Dezenfektan Kullanım Listesi

4. UYGULAMA:

Tansiyon Holter kan basıncı tetkiki, kan basıncının 24 saat kaydedilmesi işleminin adıdır. Tansiyon Holteri (veya ABPM; “ambulatory blood pressure monitoring”) olarak da anılır. Kullanımı için;

- Hastaya işlem hakkında bilgi verilir. Holter kan basıncı cihazı takılı olan kişinin günlük yaşamına her zamanki gibi devam etmesi istenir. Cihaz ölçüm yaparken ölçümün yanlış olmaması için dikkat etmek gerekir. Bu nedenle manşon şişmeye başladığında, manşonun sarılı olduğu kolu ilgilendiren bir iş / hareket yapılıyorsa buna ara verilmesi ve kolun tam açık (dirsekten katlanmamış olarak) tutulması önerilir. Tansiyon Holter cihazı takılı olan kimsenin elektrikli veya elektronik cihazlar kullanmasında, araç kullanmasında, cep telefonu kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Sadece cihaz takılı olduğu süre boyunca duş almaması veya banyo yapmaması gerekir.
- Hastanın koluna dirsekten üstte kalacak şekilde tansiyon manşonu takılır.
- Yeşil tuşa basılarak cihaz çalışır.
- Cihaz ölçüm yapana kadar start onaylanır.
- İlk ölçüm birlikte alınır.

4.1. Tansiyon holter cihazının bilgisayara aktarılması;

- Cihazın pilleri çıkarılıp USG kablosuna bağlanır.
- Tansiyon holter programı açılır. Mavi bilgisayar kutucuğuna basılıp aktarımı sağlanır.
- Hastanın adı-soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti doldurulup kaydedilir.
- İşlemi biten cihaz Dezenfektan Kullanım Listesi'ne uygun ürün ile temizlenerek bir sonraki kullanım için hazır bırakılır.

5. SORUMLULAR

Tansiyon holter cihazı kullanan tüm sağlık çalışanları sorumludur.