

**KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI****KOLONOSKOPİ CİHAZI KULLANMA
TALİMATI**

Doküman No : HB-TL-73
Yayın Tarihi : 26.09.2019
Revizyon No :00
Revizyon Tar:....
Sayfa No :1/2

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	28.09.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-73 Yayın Tarihi : 26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :2/2
	KOLONOSKOPİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; kolonoskopi cihazının kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

4. UYGULAMA:

Hastanın, hekim tarafın bağırsaklarını görüntülemek için kullanılan cihazdır. Kullanımı için;

- Cihaza uygun prosesöre baş kısmı tam oturacak şekilde yerleştirilir. Prosesörün mandalı aşağı gelecek şekilde kapatılır.
- Cihazın bir tarafına su kanalı bağlantısı, diğer tarafına aspirasyon bağlantısı yapılmalıdır.
- Prosesör yeşil açma düğmesinden açılmalıdır.
- Prosesör üzerinde bulunan ışık, aspiratör ve hava su kanal tuşlarına basılarak açılır.
- Doktor hastaya gerekli işlemi yapar.
- İşlem sonrası cihaz yıkamaya başlamadan mutlaka kaçak testi yapılmalıdır.
- Cihaz kaçak testinden geçmez ise yıkama yapılmamalıdır.(cihaz içine su girmesin diye)
- Cihaz yıkama cihazına koymadan önce içi temiz su ile aspire edilir. Dış kısmı sünger yardımı ile temizlenir.
- Yıkama cihazına uygun bir şekilde yerleştirilir ve yıkama cihaz çalıştırılır.
- Yıkamadan çıktıktan sonra aspirasyon valvi, hava-su ve biyopsi kapağı kapatılır.
- Kurutma cihazına yerleştirilir ve kuruması sağlanır.
- Kuruması biten cihaz bir sonraki işlem için kullanıma hazır bırakılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Genel Cerrahi Uzmanları ve Endoskopi hemşiresi sorumludur.