

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-29 Yayın Tarihi :01.09.2009 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:17.03.2011 Sayfa No :1/2
	ASPIRATÖR KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Cihazınbakımı kalibrasyonu ile ilgili bilgi eklenmesi		17.03.2011	Hemş. Hiz. Sevda SÜMBÜL
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi Son Gözden Geçirme:10.08.2016-07	Tüm sayfalar	10.08.2019	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Gözden Geçirme	Gözden Geçirildi	Tüm sayfalar	20.08.2022	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-29 Yayın Tarihi :01.09.2009 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:17.03.2011 Sayfa No :2/2
	ASPIRATÖR KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı kurumda aspiratörün nasıl kullanılacağını belirlemek ve standartlaştırmaktır. Tüm hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatı

Tıbbi Cihaz Bakım Planı(Plan Kod No: MC-PL-02)

4. UYGULAMA:

4.1.Cihazın Kullanımı

İşlem öncesi Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatı uygun olarak eller yıkanır ve uygun özellikteki eldiven giyilir.

- Aspiratör kavanozundaki su kontrol edilir
- Cihaz hasta başına getirilir
- Cihazın güç kablosu toprak hatlı prize takılır
- Cihaz açma/kapama anahtarından açılır
- Aspirasyona başlamadan önce aspiratör hortumunun ucu kapatılarak basınç göstergesi takip edilmeli (kaçak testi) eğer basınç yükselmiyorsa bağlantılar yeniden kontrol edilmeli kaçak olmamasına özen gösterilmelidir.
- Uygun steril aspirasyon sondası yerine takılır
- Hastaya uygun yöntemle aspirasyon işlemi uygulanır
- Aspiratör tam dolmadan boşaltılmalıdır.
- Aspirasyon işlemi tamamlanınca cihazdan su emdirilerek temizlenir
- Cihaz açma/kapama anahtarından kapatılır.
- Kavanoz ve hortum temizliği yapılır, suyu değiştirilir
- Cihaz kullanıma hazır durumda bırakılır
- İşlem sonrası Eldiven Kullanma ve El Yıkama Talimatına uygun olarak eldiven çıkartılır ve eller yıkanır.

2. Cihazın Bakımı, Kalibrasyonu

- Her cihaz HBYS'nin demirbaş modülünde kayıtlıdır. Kalibrasyon ve bakım periyodları ve yapılan bakım ve kalibrasyon kayıtları bu modül üzerinde kaydedilmektedir.