

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-70 Yayın Tarihi : 26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/2
	ATEŞ ÖLÇER KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden geçirildi	Gözden geçirme	Tüm sayfalar	28.09.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-70 Yayın Tarihi : 26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/2
	ATEŞ ÖLÇER KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; kullanılan ateş ölçerin kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Tüm hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

4. UYGULAMA:

Hastaneye muayene için gelen ayaktan ya da yatan hastaların tedavi/takip için ateş ölçümü yapılır. Ateş ölçmek için ateş ölçer cihazı kullanılır. Bunun için;

- Ateş ölçümü yapılmadan önce cihazın açma-kapama düğmesinden çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
- Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilir.
- Cihaz alın ortasına düz bir şekilde yerleştirilir. Açma kapama düğmesine basılı tutularak; +temporal arter hizasına doğru saç çizgisine paralel bir şekilde kulak ardından, kulak arkasından bulunan mastoid çıkıntısının ortasına ve kulak memesi arkasındaki yumuşak çukura kaydırılır.
- Açma kapama düğmesi bırakılır ve çıkan sonuç kaydedilir.
- İşlem sonrasında cihaz temizliği hızlı yüzey dezenfektanı sıkılmış bez ile silinir.
- Ateş ölçerin kalibrasyonu HBYS'nin demirbaş modülünde belirtilen kalibrasyon periyoduna göre yapılır.
- Ateş ölçer güvenli bir yerde muhafaza edilir.

5. SORUMLULAR

Tüm hemşireleri sorumludur.