

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; kullanılan bronkoskopi cihazının kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Bronkoskopi işleyiş sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR**3. REFERANS DÖKÜMANLAR:**

Dezenfektan Kullanım Listesi

4. UYGULAMA:

Hastanın, hekim tarafın akciğerlerini görüntülemek için kullanılan cihazdır. Kullanımı için;

Cihaza uygun prosesöre baş kısmı tam oturacak şekilde yerleştirilir. Prosesörün mandalı aşağı gelecek şekilde kapatılır.

Cihazın bir tarafına su kanalı bağlantısı, diğer tarafına aspirasyon bağlantısı yapılmalıdır.

Prosesör yeşil açma düğmesinden açılmalıdır.

Prosesör üzerinde bulunan ışık, aspiratör ve hava su kanal tuşlarına basılarak açılır.

Doktor hastaya gerekli işlemi yapar.

İşlem sonrası cihaz yıkamaya başlamadan mutlaka kaçak testi yapılmalıdır.

Cihaz kaçak testinden geçmez ise yıkama yapılmamalıdır (cihaz içine su girmesin diye).

Cihaz yıkama cihazına koymadan önce içi temiz su ile aspire edilir. Dış kısmı sünger yardımı ile temizlenir.

Yıkama cihazına uygun bir şekilde yerleştirilir ve yıkama cihaz çalıştırılır.

Yıkamadan çıktıktan sonra aspirasyon valvi ve biyopsi kapağı kapatılır.

Dezenfeksiyon ve durulama işlemi 30 dk sürmektedir. Yıkama işlemi bittikten sonra cihazlar askılı endoskop kurutma dolabına asılır.

Kurutma cihazına yerleştirilir ve kuruması sağlanır.

Kuruması biten cihaz bir sonraki işlem için kullanıma hazır bırakılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Göğüs Hastalıkları Uzmanı sorumludur.