

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-68 Yayın Tarihi :26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/2
	FETAL DOPPLER/EL DOPPLERİ KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	29.09.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
	.			
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-68 Yayın Tarihi :26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/2
	FETAL DOPPLER/EL DOPPLERİ KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; kurumda kullanılan fetal doppler cihazının kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulamaktır. Hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Planı

Tıbbi Cihaz Bakım Planı

4. UYGULAMA:

Doğum öncesi fetal kalp atışını saptamak için kullanılan elde tutulan bir ultrason dönüştürücüdür. Cihaz ses dalgaları yayarak çalışır. Genelde acil durumlarda (fetal distres, kordon sarkması, plasanta dekolman vb) gebe ameliyathaneye transfer edilirken kesintisiz fetal kalp atışını takip etmek ve dinlemek için kullanılır.

Cihaz açma kapama düğmesinden açılır. Dopplerin hastaya temas edecek probunun üzerine bir miktar jel sıkılır. Gebenin karnı üzerinde fetal kalp atışı bulunur. Böylece ses dalgaları ile takibi yapılır. İşlem bittikten sonra cihazın probu peçete yardımı ile jel silinir. Uygun temizlik ürünü ile cihazın günlük temizliği yapılır. Cihaz güvenli bir yerde muhafaza edilir.

4.1. Cihazın Bakımı, Kalibrasyonu

Kurumda her cihazın HBYS üzerinde Cihaz Sicil Kartı bulunmaktadır. Cihazların arıza, bakım ve kalibrasyon kayıtları buraya işlenmektedir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm sağlık çalışanları sorumludur.