

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-75 Yayın Tarihi :26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/2
	İNFÜZYON POMPASI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	30.09.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-75 Yayın Tarihi :26.09.2019
	İNFÜZYON POMPASI KULLANMA TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; infüzyon pompası kullanımı ile standartları belirlemek uygulanmasını sağlamaktır. Hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

Dezenfektan Kullanım Listesi

4. UYGULAMA:

Hastaneye yatan hastalara saatlik ilaç göndermek için yoğun bakımlarda veya klinik hastalarda kullanılmaktadır. Bunun için;

- Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
- Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır.
- İnfüzyon pompa seti seruma takılır ve setin içindeki hava çıkartılır.
- Serum seti uygun bir şekilde infüzyon pompasına yerleştirilir.
- Serum setinin ucu damar yoluna takılır.
- Uygun doz ve süre ayarlanır.
- Start düğmesine basarak hastaya sıvı gönderilir.
- İşlem bittikten sonra set çıkartılır.
- Cihaz açma/kapama anahtarından kapatılır.
- Cihazın temizliği Dezenfektan Kullanım Listesi' nde yer alan uygun ürün ile yapılır.
- Kullanıma hazır halde bırakılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm tüm sağlık çalışanları sorumludur.