

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	26.09.2022	Sevda SÜMBÜL Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-76 Yayın Tarihi : 26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :2/3
	KOLPOSKOPİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; kolposkopi cihazının kullanımı ile standartları belirlemek ve uygulamaktır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Kolposkopi :Rahim ağzını daha net görülmesini sağlayan parlak ışıklı büyük elektrikli mikroskop

Papsmear : Anormal servikal hücreleri tanımlamak için kullanılan tarama testi

3. REFERANS DÖKÜMANLAR:

El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı

Dezenfektan Kullanım Listesi

Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Planı

Tıbbi Cihaz Bakım Planı

Kalibrasyon Etiketleri

4. UYGULAMA:

Genelde PAPSMEAR sonuçları olağan dışı olduğunda kolposkopi kararı alınır ve işlem yapılır.

Uygulamaya başlamadan önce eller, El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatına göre yıkanır ve eldiven giyilir.

Hasta jinekolojik masaya yatırılır, üzeri örtülür.

Rahim ağzı rahat görülebilmesi için spekulum yerleştirilir.

Rahim ağzı steril gazlı bez ile silinir.

Antiseptik solüsyon ile rahim ağzı boyanır.

Kolposkop prize takılır.

Açma kapama düğmesine basılarak çalıştırılır.

Kolposkopun ışığı rahim ağzına tutularak sorunlu bir bölge olup olmadığı tespit edilir. Anormal bir bölge görülür ise biyopsi alınır ve patoloji taramasına gönderilir.

İşlem bittikten sonra kolposkop açma kapama düğmesinden kapatılır, prizden çıkarılır.

Kolposkopi temizliği, beze Dezenfektan Kullanım Listesi'nde yer alan uygun yüksek düzey dezenfektan sıkılarak cihaz silinir.

4.1. Cihazın Bakımı, Kalibrasyonu

OH' de her cihazın HBYS üzerinde Cihaz Sicil Kartı bulunmaktadır. Cihazların arıza, bakım ve kalibrasyon kayıtları buraya işlenmektedir.

Tıbbi Cihaz Bakım Planına göre periyodik bakımları yapılır.

Kolposkopi, Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Planı'na uygun olarak yılda bir kalibrasyon işlemi yapılır. Eğer cihazın değerleri, referans değerleri dışında çıkarsa cihaza kırmızı renkli "KULLANIM DIŞI" etiketi yapıştırılır. Cihazın referans değerleri normal ise, cihazın üzerine kalibrasyon etiketi yapıştırılır.

Kalibrasyon sertifikası Biyomedikal biriminde bulunmaktadır.

5.SORUMLULAR

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : HB-TL-76 Yayın Tarihi : 26.09.2019 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :3/3
	KOLPOSKOPİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI	

Bu talimatın uygulanmasından Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanları sorumludur.