

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HB-TL-63 Yayın Tarihi :01.12.2017
	TEK ODACIKLI PACE MAKER CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :1/2

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	10.12.2020	Burak GÜNER Perfüzyonist
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	15.12.2023	Burak GÜNER Perfüzyonist
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
PERFÜZYONİST		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HB-TL-63 Yayın Tarihi :01.12.2017
	TEK ODACIKLI PACE MAKER CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:... Sayfa No :2/2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı; OH' de bulunan tek odacıklı pace maker cihazı kullanımı için uygulanacak standart işlemlerin belirlenmesidir. Tek odacıklı Pace Maker cihazı kullanımını kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

HBYS :Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

4. UYGULAMA

- Cihaz 9 w pil ile çalışır.
- İlgili hekimin belirleyeceği sensitivity ayarı, output ayarı ve rate belirlenir.
- Off pozisyonundan x1 pozisyonuna gelince pace aktifleşir.
- Hastanın bacak bölgesine sabitlenir.
- İşlem tamamlandığında off pozisyonuna alınıp pili çıkarılır.
- Uygun dezenfektan ile temizlenip bakım talimatlarına uygun zamanlarda bakım ve kalibrasyonları yapılır.

4.1.Cihaz Bakım ve Kaibrasyonu

Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre cihazın bakım ve kalibrasyonları yapılır. HBYS üzerinde Demirbaş yönetimi modülünden cihaz bilgileri, arıza kayıtları, bakım ve kalibrasyon bilgilerine ulaşılabilir.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tek odacıklı pace maker cihazını kullanan sağlık çalışanları sorumludur.