

 DEZENFEKTAN KULLANIM LİSTESİ						
DEZENFEKTAN ADI	BİLEŞİM MADDESİ	ETKİ ALANI	KULLANIM ALANI / ETKİ YÜZEYİ	KULLANIM ORANI	SAKLAMA KOŞULLARI / KULLANIM KURALLARI	UYARI VE ÖNLEMLER
CHLOR TABLET (KLOR TABLET)	SODYUM HIPOKLORİT	YÜZEYLERDE UZUN SÜRE CANLI KALABİLEN ÇOĞUL DİRENÇLİ BAKTERİ VİRÜS VE MANTARLAR.	GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİMİKROBİYAL MADDE, YÜZEY VE ZEMİN DEZENFEKTANI	5 LİTRE SUYA 1 TABLET ORANINDA KULLANILIR.	ORJİNAL AMBALAJINDA VE DEVAMLİ SIKI BİR ŞEKİLDE KAPALI OLMALIDIR.SERİN VE İYİ HAVALANDIRILAN YERLERDE 25 DERECEDEDEN BÜYÜK ISILARDAN KORUYUN.GIDA MADDELERİ İLE BİRLİKTE DEPOLAMAYIN	TAHRIŞLERE NEDEN OLABİLİR , CİLT TEMASINDAN SONRA BOL SU İLE YIKAYIN , GÖZ TEMASINDAN SONRA BOL SU İLE YIKAYIP HEKİME BAŞVURUN, BAŞKA KİMYASAL MADDELERLE REAKSİYONA GİRDİĞİNDE TOKSİK KLOR GAZININ OLUŞMASI HALİNDE BU GAZ SOLUNDUĞUNDA HEMEN AÇIK HAVAYA ÇIKIN.
SUMA BAC D10 YÜZEY DEZENFEKTANI	Quarterner amonyum		gıda üretimi yapılan yerlerde temizlik ve dezenfeksiyon yapılmak üzere geliştirilmiş konsantre dezenfektan deterjandır. 	4L ılık su için 2 kapak (40 ml) ürün kullanın, karıştırın.	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZLE TEMAS HALİNDE DERHAL BOL SU İLE YIKAYINIZ VE GÖZ HEKİMİNE BAŞVURUNUZ. YUTULDUĞUNDA SU İÇİNİZ, İSTİFRA ETMEYİNİZ. KÖPÜK OLUŞUMUNDAN DOLAYI BOĞULMA TEHLİKESİ VARDIR.
SUMA CRYSTAL A8 SERT SULAR İÇİN BULAŞIK MAKİNASI DURULAMA MADDESİ	alkil alkol alkoksilat sitrik asit		makinede bulaşık yıkamada köpük kontrollü, su sertliğinin yarattığı kireçlenmeyi kontrol eden konsantre bir bulaşık parlaticısıdır.	Suma Crystal A8, bulaşık makinelerinin durulama safhasında 70-80 oC de 0.2- 0.5 ml/l konsantrasyonda otomatik olarak JohnsonDiversey otomatik pompa sistemi ile veya makine üzerinde mevcut bir pompa yardımı ile makineye dozajlanabilir. Küçük makinelerin parlaticı haznelerine elle de beslenebilir. Gerçek dozajlar bölgesel şartlara bağlıdır.	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZLE TEMAS HALİNDE DERHAL BOL SU İLE YIKAYINIZ VE GÖZ HEKİMİNE BAŞVURUNUZ. YUTULDUĞUNDA SU İÇİNİZ, İSTİFRA ETMEYİNİZ. KÖPÜK OLUŞUMUNDAN DOLAYI BOĞULMA TEHLİKESİ VARDIR.
SUMA GRİLL D9 AĞIR YAĞ ÇÖZÜCÜ FIRIN	sodyum hidroksit alkil poliglukosit		gıda ile ilgili yerler ve mutfaklardaki ağır yağ birikintilerinin periyodik temizliğinde kullanılan ağır hizmet yağ temizleyici maddedir. 	Ekipman veya yüzey üzerine spreylenerek ürün direkt uygulanır. 3. Kirilik derecesine göre 5-30 dakika beklenir.Her 10 L su için 0.5-1 L Suma Grill D9 ilave edilir	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZLE TEMAS HALİNDE DERHAL BOL SU İLE YIKAYINIZ VE GÖZ HEKİMİNE BAŞVURUNUZ. YUTULDUĞUNDA SU İÇİNİZ, İSTİFRA ETMEYİNİZ. KÖPÜK OLUŞUMUNDAN DOLAYI BOĞULMA TEHLİKESİ VARDIR.

ORİON	alkilbenzensülfonat alkiletersülfat		Tencere, tava, cam, porselen ve yıkanabilir bütün ekipmanları için elde bulaşık yıkama deterjanıdır.	1 litre ılık suya 1 - 4 ml	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZLE TEMAS HALİNDE DERHAL BOL SU İLE YIKAYINIZ VE GÖZ HEKİMİNE BAŞVURUNUZ. YUTULDUĞUNDA SU İÇİNİZ, İSTİFRA ETMEYİNİZ. KÖPÜK OLUŞUMUNDAN DOLAYI BOĞULMA TEHLİKESİ VARDIR.
SUMA İNOX D7 PASLANMAZ ÇELİK PARLATICI	destilatlar (petrol),		gıda ile temas etmeyen paslanmaz çelik yüzeyler için direkt kullanıma hazır yüzey parlaticisidir.	yüzeye gerekli miktarda direkt uygulanır.	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZLE TEMAS HALİNDE DERHAL BOL SU İLE YIKAYINIZ VE GÖZ HEKİMİNE BAŞVURUNUZ. YUTULDUĞUNDA SU İÇİNİZ, İSTİFRA ETMEYİNİZ. KÖPÜK OLUŞUMUNDAN DOLAYI BOĞULMA TEHLİKESİ VARDIR.
SUMA NOVA L6 SERT SULAR İÇİN BULAŞIK DETERJANI	Sodyum hidroksit*		sert sularda etkin leke temizliği için özel olarak formüle edilmiş sıvı, konsantre bulaşık yıkama makinesi deterjanıdır.	dozaj pompalarıyla kullanılır. Sert su şartlarında mükemmel sonuçlar için bölgesel ihtiyaçlara bağlı olarak 1.5 - 4 ml/L dozajda kullanın. 	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZLE TEMAS HALİNDE DERHAL BOL SU İLE YIKAYINIZ VE GÖZ HEKİMİNE BAŞVURUNUZ. YUTULDUĞUNDA SU İÇİNİZ, İSTİFRA ETMEYİNİZ. KÖPÜK OLUŞUMUNDAN DOLAYI BOĞULMA TEHLİKESİ VARDIR.
TASKİ CİF R7 KREM TEMİZLEYİCİ	Sodyum alkilbenzensülfonat		çok kirli tüm sert yüzeylerin genel temizliği	yüzeye gerekli miktarda direkt uygulanır.	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ.
TASKİ CLONET EKSTRA PLUS BANYO TEMİZLEYİCİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ	Sülfamik asit Alkil alkol etoksilat		Kireç kalıntılı yüzeyler, banyo temizliği	yüzeye gerekli miktarda direkt uygulanır.	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ.

TASKİ JONTEC 300			Suya dayanıklı sert zeminler için özel olarak formüle edilmiş günlük temizleme maddesidir.	10 lt su için 100ml	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ. Cıvalı yüzeylerde %1'den fazla konsantrte solüsyon kullanmayın. Tahta veya mantar gibi suya hassas yüzeylerde kullanmayın.
TASKİ JONTEC ETERNUM AKRİLİK CİLA	etanol alkil alkol etoksilat		Düz ve suya dayanıklı, sert yüzeylerin çoğu için yüksek-parlatıcı özellikli, kayma dirençli zemin emülsiyonu.	yüzeye gerekli miktarda direkt uygulanır.	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ Diğer maddelerle seyreltmeyin veya karıştırmayın. İşlenmiş plastik (yaylı vinil) ve kaplanmamış ahşap veya mantar zeminler üzerinde kullanmayın. Profilli/çivili kauçuk zeminlerde kullanmak için danışın. Dışarıda veya ıslak yerlerde kullanmayın.DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ.
TASKİ JONTEC NO:1 KİR VE CİLA ÇÖZÜCÜ	2-fenoksietanol 2-aminoetanol potasyum hidroksit 2-(2-etoksietoksi)etanol		Kristalize cila ve dayanıklı zeminden kir sökme	10lt suya 1,5-2lt	SOLÜSYONU ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ	GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ.
TASKİ R1 PLUS TUVALET TEMİZLEYİCİ KONSANTRE	dördüncülamonyumbileşikler, trime thyltallowalkilörürleri(		klozet ve pisura temizliği	yüzeye gerekli miktarda direkt uygulanır.		GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ.

TASKİ R2 PLUS ÇOK AMAÇLI KONSANTRE HİJYENİK YÜZEY TEMİZLEYİCİ	alkil alkol etoksilat alkildimetilbenzilamonyumklorid esildimetilamonyumklorür		günlük hijyenik zemin ve yüzey temizliği	yüzeye gerekli miktarda direkt uygulanır.		GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ.
TASKİ R3 PLUS CAM TEMİZLEYİCİ KONSANTRE	water, distilled, conductivity or of similar purityalkil alkol etoksilat		Cam ve parlak yüzelerin temizliği	yüzeye gerekli miktarda direkt uygulanır.		GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ.
Room Care R5-Plus	1,2-benzizotiyazol-3(2H)-on(Benzisothiazolinone).		Hava şartlandırma	Havaya gerekli miktarda direkt uygulanır.		GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ.
TASKİ SPRINT FLOWER PLUS	Propan-2-ol,Sulfonic acids,p-menth-1-en-8-ol alkil alkol etoksilat tert-butylcyclohexyl acetate cloheptadecane-5,17-dione		Günlük zemin ve yüzey temizliği	10 lt suya 200ml		GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ.
FORMALDEHİT	Formaldehit,metil alkol, su		ORTAM TEMİZLİĞİ İÇİN KULLANILIR	SPANÇ VEYA PED ÜZERİNE 10 CC DÖKÜLEREK KULLANILIR.	KURU, SOĞUK VE İYİ HAVLANDIRILMIŞ BİR YERDE AĞZI SIKICA KAPALI OLARAK SAKLANIR.	DERİ İLE TEMASTAN SONRA:BOL SU İLE YIKANMALI
						GÖZ TEMASINDAN SONRA:HEMEN BOL SU İLE GÖZ KAPAKLARININ ALTIO DAHİL OLMAK ÜZERE EN AZ 15 DK. BOYUNCA YIKANMALI. SEMPTOMLAR DEVAM EDERSE DOKTORA BAŞVURULMALI.
TUSORB SIVI ATIK YOĞUNLAŞTIRICI, KATILAŞTIRICI ABSORBAN	Polyprop-2-enoate Sodium		SIVILARI JELLEŞTİRMEK AMAÇLI KULLANILIR.	GEREKLİ MİKTARDA DÖKÜLEREK KULLANILIR.	SIVININ ÜZERİNE ORANI KADAR DÖKÜLÜR 5 DAKİKA SIVININ KATILAŞMASI BEKLENİR, ATIK TEMİZLENİR. HER KULLANIMDAN SONRA ÜRÜNÜNAĞZI KAPALI TUTULMALIDIR. KAPAK AÇIK BIRAKILMAMALIDIR.	Deri ile sürekli teması hafif tahriş edici olabilir. Malzemenin yenmesi zararlı olabilir.Göz ile teması hafif tahriş edici olabilir.Solunması halinde açık havaya çıkınız.
DETRO DERM	Propan-2-ol (%70 V/V), gliserin, yardımcı maddeler	Bakterisidal, fungisidal, virusidal, tüberkülosidal.	Ellerin ve cildin hijyenik ve cerrahi antisepsisi için sağlık hizmeti verilen her yerde kullanıma uygundur.	Hijyenik el antisepsisi için en az 3 ml solüsyon seyreltilmeden ele uygulanır ve 30 sn boyunca eller kuruyana kadar ovulur.	Yiyecek, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. iyi havalandırılmış, kuru ve serin, ısı, açık alev ve gün ışığından uzak yerlerde 5 °C ile 25°C arasında depolayın.	Kazara dökülmesi sonucu bol su ile yıkayın. Göz ile teması: Göz kapaklarını açık tutarak bol su ile yıkayın, rahatsızlık edici bir gelişme olursa doktora başvurun ve su ile yıkamaya devam edin.Yutma halinde Ürünü seyreltmek için bol su ya da süt için.

DETRO ENZYM	Enzimler (amilaz, proteaz, lipaz, selüloz), glikol, noniyonik sürfaktanlar, kuarter amonyum bileşikleri, antikorozif maddeler.	Organik kirliliklerinden arınan materyallerin mikrobik yükünü azaltır.	Her türlü cerrahi aletlerin, medikal cihazlar?n ve endoskoplara ön temizliğini sağlar.	Manuel ve ultrasonik kullanımda 5 dk da etkilidir.	İyi havalandırılmış, kuru ve serin, ısı, açık alev ve gün ışığından uzak yerlerde 0°C ile 25°C arasında depolayın.	Ciddi göz hasarına yol açar. Gözlerde kontak lens varsa hemen çıkarın. Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde, göz yıkama solüsyonu (%5,lik borik asit çözeltisi) ile veya en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın.
DETRO PAA 2200	%3 Hidrojen peroksit, stabilizatör, Ph dengeleyici, deiyonize su	Bakterisidal, fungisidal, virüsidal, sporisidal, tüberkülosidal.	Paslanmaz çelikten yapılmış genel cerrahi, anestezi ve dental cerrahi aletlerinde, rijit ve flexible endoskoplarda, plastik, silikon, cam, akrilat, lastik ve kauçuktan yapılmış medikal aletlerde daldırma yöntemi ile yüksek düzey dezenfeksiyon ve soğuk sterilizasyonda kullanılır	Aktivatörün tamamı 5 litrelik bidona boşaltınız. 10 dakika bekleyiniz. Aktivasyon sonrası kullanılır.	Son kullanım tarihi, üretim tarihinden itibaren 18 aydır.Ambalajını sıkı kapatılmış bir şekilde, iyi havalandırılan ve 0-25 C aralığındaki ortamda muhafaza ediniz.	Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Soluma Baş dönmesi ve mide bulantısı gibi durumlarla karşılaşılırsa, etkilenen kişi temiz havaya çıkartılmalıdır. Şikâyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurulmalıdır. Yutma KUSTURMAYIN. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Ağız iyice çalkalayın. Hemen doktora başvurun! Ciltle Temas Cildi bol su ile yıkayınız. Gözlerle Temas Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Hemen doktora başvurun. Suyla yıkamaya devam edin.
DERHAND SOAP	Solvent, sodyum coceth-30, sulfate, cocamide dea, sodyum chloride, sodyum benzoate, parfum, glycerin, citric acid, CI 45100	Bakterisidal, fungisidal, virüsidal, tüberkülosidal.	Ellerin ve cildin hijyenik ve cerrahi antiseptisi için sağlık hizmeti verilen her yerde kullanıma uygundur.	Her yıkamada 1 - 3 ml yeterlidir.	Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kapa sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip Kaplarda saklayın. 0-50 C arasında depolayın. Kullanımı eller ıslatılır. • Dispenserden ya da pompadan bir iki basım ile bir miktar Derhand Soap alınır. • Eller, parmak araları ve bilekler dahil en az 30 sn yıkanır. • Bol su ile durulanır. • Eller tek kullanımlık havlu ile kurulur. • Her yıkamada 1 - 3 ml yeterlidir.	Ürünün göz ile temasından kaçınınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kapa sıkıca kapalı tutun. Profesyonel kullanım içindir. Kullanım öncesi ürün etiketini dikkatlice okuyunuz ve kullanım talimatına uyunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

OXİVİR Excel CE Foam	%0,36 Hidrojen Peroksit	Bakterisidal, fungisidal, virusidal, sporisidal, tüberkülosidal.	Ürün kadın doğum klinikleri, göz muayene klinikleri, KBB aletleri, yenidoğan küvözleri, yenidoğan üniteleri, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis, hemodiyaliz üniteleri, yanık üniteleri, dental cerrahi vb tüm hastane birimlerinde kullanılan invaziv olmayan tıbbi cihazların temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Tıbbi cihazlar için kullanıma hazır temizleyici-dezenfektan	15 sn bakterisidal, 30 sn'de maya/mantar, 30 sn'de virüsidal, 1 dk da mikobakterisidal/tüberkülosidal, 5 dk sporisidal etki	Kullanılacağı medikal cihaz/ekipmanı tamamen kaplayacak şekilde püskürtülür ve partikül bırakmayan bir bez ile dezenfekte edilecek tüm alan nemlenecek şekilde silme işlemi yapılır. Sonrasında kurumaya bırakınız. İyi havalandırılmış ortamda ve orijinal kabında saklayınız.	Elleğleme ve Güvenlik kullanım talimatları için güvenlik bilgi formuna bakınız.Yalnız profesyonel kullanım içindir.
DERDEVICE P50	%45 etil alkol,%5 propan-2-ol,%0,05 didesil dimetil amonyum klorür	Bakterisidal, fungisidal, virusidal,	Sıklıkla el temasının olduğu yüzeylerin temasının olduğu yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılır.	Uygulanacak yüzeye 30 cm mesafeden tüm yüzeyi kaplayacak şekilde püskürtülür.	Islanmasında sakınca olmayan tüm yatay ve dikey yüzeylerde kullanılır. İyi havalandırılan 25 C altındaki sıcaklıkta güneş ışından uzak bir yerde saklayınız.	Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Buhar veya zerrecikleri solumayınız. Uygulama aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız. Ürün yanıcıdır, direkt ateş kaynaklarından uzak tutunuz.Oksitleyici maddelerden uzak tutunuz.
TASKİ HYPO JEL (ÇAMAŞIR SUYU)			yüzeylerin genel temizliğinde kullanılan çamaşır suyu katkılı ve hoş kokulu bir dezenfektanlı deterjandır.	Sulandırarak kullanılır: Fayanslar, yer, duvar ve diğer geniş alanlar için 25 ml (2 kapak) Taski Hypo Gel'i yarım kova suya (5lt) dökün ve temizlenecek yüzeye uygulayın.	Sulandırarak Kullanım: Fayanslar, yer, duvar ve diğer geniş alanlar için 25 ml (2 kapak) Taski Hypo Gel'i yarım kova suya (5lt) dökün ve temizlenecek yüzeye uygulayın. Doğrudan Kullanım: Ağır kirleri temizlerken Taski Hypo Gel'i doğrudan süngere dökün ve temizlemek istediğiniz yüzeye sürün. Kısa bir süre bekledikten sonra nemli bezle silin	TAHRİŞLERE NEDEN OLABİLİR , CİLT TEMASINDAN SONRA BOL SU İLE YIKAYIN , GÖZ TEMASINDAN SONRA BOL SU İLE YIKAYIP HEKİME BAŞVURUN, BAŞKA KİMYASAL MADDELERLE REAKSİYONA GİRDİĞİNDE TOKSİK KLOR GAZININ OLUŞMASI HALİNDE BU GAZ SOLUNDUĞUNDA HEMEN AÇIK HAVAYA ÇIKIN
TASKİ SPRINT SPİTFİRE PLUS (AĞIR KİRLER İÇİN LEKE SÖKÜCÜ)	2-butoxyethanol, sodium carbonate, sodium alkylbenzenesulphonate		CAM VE DİĞER SUYA DAYANIKLI SERT YÜZEYLERİN GÜNLÜK GENEL TEMİZLİĞİ İÇİN İZ BIRAKMAYAN GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ.	TEMİZ BİR BEZ ÜZERİNE BİR MİKTAR ÜRÜN SPREYLEYİN VE YÜZEYİ TEMİZLEYİN		GÖZE SIÇRADIĞINDA GÖZÜ TEMİZ VE SOĞUK SU İLE YIKAYINIZ; YUTULDUĞUNDA BOL SU İÇİRİNİZ VE KUSTURMAYINIZ. HER İKİ DURUMDA DA HEMEN İLGİLİ HEKİME BAŞVURUNUZ.