

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-27 Yayın Tarihi :20.09.2024
	ARCHİTECHT ALİNİTY HORMON OTOANALİZATÖR CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No:00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/1

1.AMAÇ: Alinity hormon otoanalizatör cihazının çalıştırılmasının tanımlanması.

2.KAPSAM: Cihazı kullanan laboratuvar personelini kapsar.

3.SORUMLU:

Laboratuvar sorumlu hekimi, laboratuvar sorumlu teknisyen/teknikeri sorumludur.

4.GÜNLÜK BAKIMI:

4.1. Cihaz PAUSE tuşuna basılarak IDDLE moduna alınır. Problar temizlenir.

4.2. Ekrandan SUPPLİES kısmından cihaz sıvıları kontrol edilerek eksik olanlar tamamlanır. Cihazın alt kapağındaki küvet atık kabı boşaltılarak resetlenir.

4.3.Günlük bakım kitine 25 ml çamaşır suyuyla dilüe edilmiş olan sıvı doldurulur (23 ml distile su 2ml çamaşır suyu)ve cihazın rak bölümüne yerleştirilir. Sırasıyla cihazda PROCEDURES-DAILY – PERFORM a basılır ve işlem başlatılır. İşlem bittikten sonra DONE yapılarak işlem sonlandırılır.

4.4. REAGENT sayfasına basılarak eksik olan kitler tamamlanır.

4.5. Cihazı çalışır duruma getirmek için RUN tuşuna basılır.

5. GÜNLÜK KONTROL ÇALIŞMASI:

5.1. MULTICHEM IA PLUS KONTROL1-2-3 kontrolleriyle günlük kontrol verilir.

Barkodlu yüzeyi rakın ön tarafına gelecek şekilde yerleştirilir ve cihaz otomatik olarak kontrolleri çalışır.

5.2. Kontrol manuel verilecek ise ;CREATE ORDER-CONTROL seçilir. RACK NO-POSITION NO-KONTROL LEVEL NO doldurularak kontrol verilecek test seçilir ve ADD ORDER a basılır.