

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-28 Yayın Tarihi : 20.09.2024
	ARCHİTECHT İ2000 HORMON CİHAZI KULLANIM TALİMATI	Revizyon No:00 Revizyon Tar.:.... Sayfa No :1/1

1.AMAÇ: Architect İ2000 hormon cihazının çalıştırılmasının tanımlanması.

2. KAPSAM: Cihazı kullanan laboratuvar personelinin kapsar.

3.SORUMLULAR: Laboratuvar sorumlu hekimi, laboratuvar sorumlu teknikeri, laboratuvar teknisyenleri ve teknikerleri

4.UYGULAMA:

4.1. Cihazın fişi prizde sürekli takılı tutulur.

4.2. Cihaz açma kapama düğmesinden açılır.

4.3. Cihaz sarf malzemeleri kontrol edilir eksik malzemeler (Trigger solisyonu, pre-trigger solisyonu, Wash Buffer solisyonu, RV miktarı, atık kapları) tamamlanır.

4.4. Cihazın kit bölmesindeki kitler kontrol edilerek eksik kitler tamamlanır.

4.5. Cihazın günlük bakımı yapılır. Cihazın READY konumundayken Reaktif rakının sarı kısmına $\frac{3}{4}$ oranın da çeşme suyu doldurularak yerleştirilir. Pembe kısmına PROBE CLEANİNG SOLUTION yerleştirilir. Cihazın 12 no'lu kısmından itilir 13 no'lu kısım boş kalmalıdır. SYSTEM menüsünden MAİNTENANCE seçilir. Sonra DAİLY işaretlenir. Açılan menüden 6440 DAİLY MAİNTENANCE seçilip PERFOM işaretlenir. Yapılacak liste okunup PROCEED seçilir. Sora tekrar PROCEED seçilerek bakım başlatılır.

4.6. Bittiği zaman bakım şişesi cihazdan çıkartılır. Tekrar PROCEED ve daha sonra DONE seçilerek ana menüye geçilir.

4.7. Cihaza günlük çalışılan testlerin kontrolleri verilir. ORDERS ekranından CONTROL ORDER seçilir. Kontrol solüsyonunun bulunduğu rak numarası ve pozisyonu yazılır. İstenilen testler seçilerek ADD ORDER tuşuna basılır ve cihaz RUNNING konumunda çalışmaya başlar.