

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-29 Yayın Tarihi : 20.09.2024
	ARCHİTECHT C8000 BİYOKİMYA OTOANALİZATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Revizyon No:00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :1/1

1.AMAÇ: Architech C8000 Biyokimya Otoanalizator cihazının çalıştırılmasının tanımlanması.

2.KAPSAM: Cihazı kullanan laboratuvar personelini kapsar.

3.SORUMLU:

Laboratuvar sorumlu hekimi, laboratuvar sorumlu teknisyen/teknikeri sorumludur.

4.GÜNLÜK BAKIMI:

4.1. Cihaz READY konumuna alınır System back up yapılarak yedekleme alınır.

4.2. Ekrandan SUPPLİES kısmından cihaz sıvıları kontrol edilerek eksik olanlar tamamlanır.

4.3. Ekrandan sırası ile SYSTEM-MAİNTANENCE-DAİL-6070 DAİLMAİNTANENCE tıklanır.

Altan PERFORM tıklanarak bakım başlatılır. Bakım bittikten sonra sırası ile PROCEED- DONE basılarak bakım tamamlanır.

4.4. Cihazın içindeki kitler kontrol edilerek ekrandan REAGENTS tuşuna basılır. Eksik var ise yükleme yapılarak SCAN tuşuna basılır.

4.5. Cihazı çalışır duruma getirmek için RUN tuşuna basılır.

5. GÜNLÜK KONTROL ÇALIŞMASI:

5.1. MULTİCHEM LEVEL 1-2, SPESİFİK PROTEİN 1-2, CK-MB KONTROL 1-2, IGE KONTROL 1-2 ,HBA1C KONTROL 1-2 kontrolleri günlük verilir.

5.2. Ekrandan ORDERS –CONTROL ORDER tıklanır. Rutin çalışmada kullandığımız kontroller seçilir. Rack numarası ve pozisyon numarası yazılır. Kontrol çalışacağımız testlerseçilerek alttaki ADD ORDER tuşuna basılır. Hazırladığımız kontroller cihaza verilir.

5.3. Kontrol sonuçlarını ekrandan görebilmek için ekrandan QC-CAL tıklanır. LEVEY-JENRİGS GRAPH tıklanır. Ekrandan kontrol sonucu görmek istediğimiz test seçilir DONE tuşuna basılarak grafik halinde değerlendirilir.

5.4. Kontrol sonuçları Bizmed'deki "YÖNETİMSEL İŞLEMLER/LABORATUVAR KONTROL SONUÇLARI" sayfasından değerlendirilir.

5.5. Cihaz günlük çalışma için kullanıma hazır duruma getirilerek rutin çalışmaya başlanır.