

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: BL-TL-30 Yayın Tarihi : 20.09.2024
	SYSMEX XN 1000 CİHAZI KULLANMA TALİMATI	Revizyon No:00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1

1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı laboratuvarda bulunan SYSMEX XN 1000 cihazının kullanımını ve bakımında dikkat edilecek hususları kapsamaktadır. Laboratuvar işleyiş süreçlerini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

4. UYGULAMA: Laboratuvarda bulunan SYSMEX XN 1000 cihazını kullanmadan önce; cihazın gerektirdiği şekilde kurulmuş ve bağlanmış olduğunu kontrol etmek gerekmektedir.

4.1. Cihazın Hazırlanması ve Günlük Rutin Çalışma:

- Cihaz her sabah açılıp kapatılır.
- Kontrol kanı verilir.
- Solüsyonları kontrol edilir.
- Hasta numune türü olan Edtalı tam kan geldiğinde racka dizilir.
- Cihaz okuma yerine konulur.
- Manuel hasta vermeye geçmek için cihaz üzerindeki dönüştürücüye basılır.
- Bilgisayardaki manuel el tuşuna basılarak barkod okutulur.
- Okuma yerine hasta yüklenir ve cihaz üzerinde mavi mavi düğmeye basılır

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlu teknisyeni ve tüm laboratuvar teknisyenleri sorumludur.