

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:HB-TL-92 Yayın Tarihi :05.11.2024 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/3
	TEE (TRANSÖZAFAGİAL KOKARDİYOĞRAFİ) PROBU TEMİZLİĞİ TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:HB-TL-92 Yayın Tarihi :05.11.2024 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:... Sayfa No :2/3
	TEE (TRANSÖZAFAGİAL KOKARDİYOĞRAFI) PROBU TEMİZLİĞİ TALİMATI	

1.AMAÇ VE KAPSAM

Kullanılan cihazın temizliğini sağlamaktır. Hasta bakım sürecinde enfeksiyon kontrolünü kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

TEE (Transözafagial ekokardiyografi)

3.REFERANS DOKÜMANLAR

Yıkama Etkinlik Testi Kontrol Formu

4.UYGULAMA

Transözofagial ekokardiyografi problemleri bükülebilir skoplar gibi, yarı kritik tıbbi cihazlardır. Biyopsi yapılmaması, hava, su kanallarının olmaması nedeni ile temizlik ve dezenfeksiyonu üst gastrointestinal skoplardan daha kolaydır. Her kullanım sonrası temizlik dezenfeksiyon işlemi mutlaka yapılmalıdır. Elde veya otomatize cihazlarda temizlik ve dezenfeksiyonu yapılabilir. El ile temizlik-dezenfeksiyon işlemi aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

- Hasar açısından prob kontrol edilir.
- Vücut sıvılarının kurumasına fırsat verilmeden prob sudan geçirilmelidir.
- Ön temizliği bol miktarda ılık su ile yapılmalı ve yıkama suyu tek kullanımlık olmalıdır. Yıkama genel olarak 1 dakika sürer.
- Prob üretici önerileri doğrultusunda hazırlanmış ve üretici firma tarafından önerilen sürede bir solüsyona daldırılır.
- Probun sıvıya daldırılmayan kısımları da dezenfektan ile nemlendirilmiş, hav bırakmayan tek kullanımlık bir bez ile silinir.
- Ardından solüsyon kalıntısı kalmayacak şekilde bol ılık su ile durulanır.
- Cihaz uygun bir bez ile kurulanır.
- Kullanılmadığı zaman vertikal olarak kuru bir şekilde asılı tutulur.
- Transfer kutularının içinde saklanması uygun değildir.
- Kullanılan dezenfektan solüsyonunun Minimal Etkinlik Kontrolü;
 - Her gün solüsyon kullanılmadan önce 1 test,
 - Günlük her 10 kullanımdan sonrası 1 test,
 - Haftalık kullanım için, kullanım öncesi 1 test
- Yıkama etkinliğinin ölçümü açısından protein yükü ölçümü kontrol stripleri kontrol edilir. Yıkama etkinlik ölçümleri 15 günde bir kez, düzenli periyotlarla yapılır.
- Kontrol işlemi yapıldıktan sonra Yıkama Etkinlik Testi Kontrol Formu'na kayıt edilir.

5. SORUMLULAR

Endoskopi ünitesinde çalışan hemşire ve kardiyoloji uzmanları sorumludur.

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No:HB-TL-92 Yayın Tarihi :05.11.2024
	TEE (TRANSÖZAFAGİAL KOKARDİYOĞRAFİ) PROBU TEMİZLİĞİ TALİMATI	Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :3/3