



www.sgp.com.tr 0212 320 30 75

İLK YARDIM PLANI GÖZ YARALANMASI

plum

www.plum.com.tr 0212 320 30 74

MADDE	GÖZ DUŞU	DUŞA DEVAM ET	DUŞ SÜRESİ
YABANCI CİSİMLER Örneğin, toz, kir, metal ve ahşap çapakları v.b.	Plum Eyewash	Plum Eyewash	Yabancı cisim atılana kadar Göz Duşu solusyonunu kullanın.
ASİT YARALANMASI	pH Neutral	Plum Eyewash	Yaklaşık iki dakika boyunca pH Nötr solusyon ile yıkayın, sonrasında rahatsızlık kaybolana kadar veya doktora ulaşana kadar ,Plum Eyewash kullanın.
ALKALİ YARALANMASI Kalsiyum içeren maddeler hariç örneğin kireç ve çimento	pH Neutral	Plum Eyewash	Yaklaşık iki dakika boyunca pH Nötr solusyon ile yıkayın, sonrasında rahatsızlık kaybolana kadar veya doktora ulaşana kadar ,Plum Eyewash kullanın.
DİĞER YARALANMALAR Örneğin solvent ve yağ	Plum Eyewash	Plum Eyewash	Yanma, rahatsızlık durana kadar veya doktora ulaşana kadar Plum Eye wash ile yıkayın.
DERİ YARALANMALARI Asitler, bazlar ve kimyasallar	pH Neutral	Plum Eyewash	Yaklaşık iki dakika boyunca pH Nötr solusyon ile durulayarak yıkayın, sonrasında rahatsızlık kaybolana kadar veya doktora ulaşana kadar ,Plum Eyewash kullanın.




pH Neutral Plum Eyewash



İstasyondan göz duşunu alın.



Kapağı oklar yönünde çevirerek kırın ve göz duşu kullanılmaya hazır.

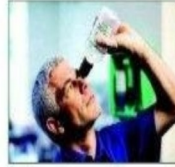

Kafanızı arkaya doğru eğerek göz duşunu kullanabilirsiniz.



Kafanızı öne doğru eğerek göz duşunu kullanabilirsiniz.

!!! ÖNEMLİ !!!

Yaralanma halinde kapağı ok yönünde çevirerek açın ve göz fincanını gözüneze değecek şekilde bastırmadan tutun. Şişeyi yavaşça sıkın, solusyon fincana dolacak ve tahliye deliklerinden dışarıya akacaktır. Gözünüzdeki acı ve yanma dursa bile tıbbi yardım isteyin. Sağlıklı kuruluşuna gidene kadar yıkama işlemine devam edin. Şişeler tek kullanımlık olup kapağı açıldıktan sonra bitene kadar kullanılmamalıdır. Açık kapaklı olan ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın.

Form Kod No:ML-DK-01

Rev.No:00/Rev.Tar:...