

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HB-TL-06 Yayın Tarihi :23.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1
	WHİRLPOOL KAZANI KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son gözden geçirme tarihi: 07.11.2017-05	Tüm sayfalar	04.11.2019	Özgür GÜNER Fizyoterapist
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No: HB-TL-06 Yayın Tarihi :23.11.2012 Revizyon No :00 Revizyon Tar:.... Sayfa No :1/1
	WHİRLPOOL KAZANI KULLANMA TALİMATI	

FİZYOTERAPİST	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM
---------------	-------------------	----------

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; Optimed hastanesinde Whirlpool Kazanı kullanımı ile ilgili standartları belirlemek ve uygulamaktır. Whirlpool kazanı, kas spazmını azaltıp, eklem ağrılarını azaltır. Deri reseptörlerine mekanik etki oluşturarak, sedatif ve analjezik etki meydana getirir. Whirlpool kazanı kullanımını kapsar.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

FTR :Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Whirlpool kazanı :Girdap banyosu

HBYS :Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

3. REFERANS DOKÜMANLAR

Cihaz Yönetimi Prosedürü

4.UYGULAMA

- Kazana 80 lt çeşme suyu konulur, üzerine 3,7 cc dezenfektan, Dezenfektan Kullanım Listesine göre ilave edilir.
- Kazan toprak hatlı prize takılır.
- Üst ekstremitte hastaları 20 cm yükseklikteki taburede alt ekstremitte hastaları tekerleksiz sandalyede oturur.
- Tedavi edilecek uzvun kıyafetleri çıkarılır, ya da sıyrılır.
- Uzuv kazanın içine konulduktan sonra cihaz açma-kapama düğmesinden açılır.
- Hava-su sirkülasyon oranı kazandaki aparattan yapılabilir.
- Tedavi sonunda cihaz kapatılır, uzuv peçeteyle kurulanır.

4.1.Temizliği

Whirlpool bakımında her kullanımdan sonra mutlaka tankın ve türbinlerin temizlenmesi gereklidir.

Tankın dış kısmı paslanmaz çelik cilası ile cilalanabilir.

İyi bir temizleme tankın kullanımından hemen sonra boşaltılarak olur.

Tankın iç kısmı dezenfektanlar ile fırçalanmalı ve sonra temiz su ile temizlenmelidir.

4.2.Cihaz Kalibrasyonu

Cihaz Yönetimi Prosedürü'ne göre bakım ve kalibrasyonlar yapılır. Kalibrasyon planı, arıza ve bakım kayıtları HBYS üzerinde Demirbaş Yönetimi modülünde mevcuttur.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi çalışanları sorumludur.